

口腔设备供水器使用说明书

桂林维润医疗科技有限公司
Guilin VeiRun Medical Technology Co., Ltd.

产品名称

口腔设备供水器

型号

| 型号 | 尺寸 (mm) | 净重 | 备注 |
|---------|------------|------|-----|
| WSD-III | 190×150×80 | 600g | 标准型 |

产品的技术参数

电源：主机：DC 12V 0.5A

电源适配器：AC 100~240V (1±10%) 50/60Hz

供水水量：不小于50mL/min

供水水压：不小于0.02MPa

工作温度：5°C~40°C

相对湿度：≤80%

大气压力：70kPa~106kPa

主要结构

本仪器由泵、控制电路及附件组成。

适用范围

该产品适用于口腔设备的水源供给。

安装说明

•安装水瓶

将水瓶装满水后，拧紧瓶盖，再将水瓶插入供水器中，注意插紧。


•液路连接

用随机配送的两端带有接头的液路管，一端接供水器的出水口，另一端接超声洁牙机或其他用水设备的进水口。

•电源连接

将电源适配器插头连接到供水器的电源插口。

WSD-III连接示意图

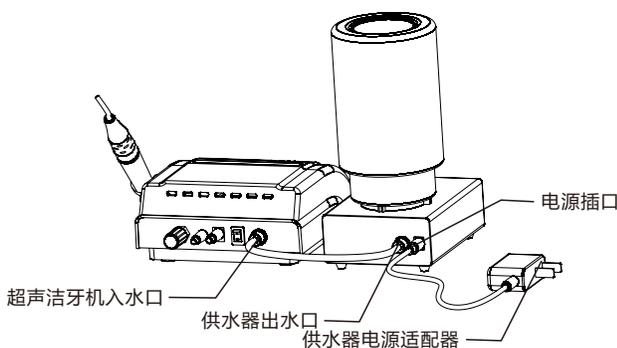

使用说明

WSD-III (通用型, 适配任何厂家的超声洁牙机)

供水器附带的DC 12V 电源适配器接在供水器电源插口。

将液路连接管分别接在供水器出水口和超声洁牙机入水口。

超声洁牙机连接方式参考厂家说明书。

将供水器的电源打开后, 供水器可是给超声洁牙机供水, 按需求调节超声洁牙机的功率大小及水量大小, 即可使用。

保养与维护

供水水源请使用纯净水或双氧水、洗必泰、次氯酸钠等, 以免堵塞液路系统。

不使用时请把供水器电源开关关闭。

如果长时间不使用口腔设备供水器, 请每半个月开一次机, 使用纯净水清洗液路2分钟。

运输及贮存

环境温度: 0°C~50°C; 相对湿度: ≤95%; 大气压力: 50kPa~106kPa;

配件清单及符号说明

| 序号 | 附件名称 | 数量 |
|----|-------|----|
| 1 | 水瓶 | 1个 |
| 2 | 液路连接管 | 1条 |
| 3 | 电源适配器 | 1个 |
| 4 | 密封圈 | 1套 |

VRN® 注册商标



电器电子产品回收标志



避免雨淋



温度限制



BF型应用部分



注意
参考随附文件



生产企业



大气
压力限制



向上



序列编号



II类设备



参考
使用说明书



易碎,
小心轻放



堆码层数限制



湿度限制



制造商、产品备案相关信息

产品名称: 口腔设备供水器

产品型号: WSD-III

企业标准编号: Q/VRN 0001

生产企业名称: 桂林维润医疗科技有限公司

生产地址: 桂林市高新区信息产业园D-02号404室、405室

邮编: 541004

电话: 0773-2260566 2260599

传真: 0773-2260518

生产日期: 详见合格证

使用期限: 5年



更多信息请扫描二维码

版本号: 10/2014-1-C2

| | |
|------|-------|
| 用户姓名 | |
| 联系地址 | |
| 联系电话 | |
| 产品编号 | |
| 购买日期 | 年 月 日 |
| 故障申诉 | |

保修说明

尊敬的用户:

感谢您购买并使用本公司的产品! 为了使我们的服务更加令您满意, 请在购买前详细阅读和填写保修卡, 并妥善保管, 返修产品时, 请将产品及保修卡一并寄回, 否则按产品生产日期计算保修期限。

一、保修期限

本产品自公司出售之日起, 凭保修卡, 保修一年, 终身维修。

二、保修范围

在保修期内, 凡属于产品质量、工艺结构等引起的故障 均属于保修范围。

三、不属于保修范围

1、违反操作规程或达不到设备所需条件而引起的故障。

2、用户使用不当或擅自拆装造成的设备故障或损坏的。

3、因用户运输、存储不当或其他原因引起设备损坏的。

4、保修卡无出售单位盖章或填写不完整的不予保修。

注: 产品返厂维修时请填写保修卡, 与产品一并寄回。